



Ustawianie glukometru Optium Xido™



Przycisk
„wstecz”

Przycisk
„do przodu”

Przycisk
ustawień

1 Wejście do opcji ustawień:




- Nie wsuwać paska testowego
- Przyciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk ustawień

2 Ustawianie dźwięku




- Włącz lub wyłącz dźwięk używając przycisku „wstecz” lub „do przodu”.
- Krótco przyciśnij środkowy przycisk ustawień, aby przejść dalej.

3 Ustawianie czasu - godzina

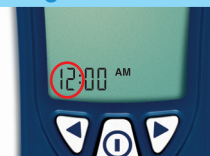


- Ustaw odpowiednią godzinę używając przycisku „wstecz” lub „do przodu”.
- Krótco przyciśnij środkowy przycisk ustawień, aby przejść do ustawień minut.

4 Ustawianie czasu - minuty

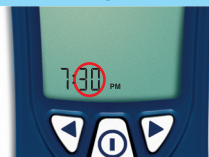

- Ustaw odpowiednią minutę używając przycisku „wstecz” lub „do przodu”.
- Krótco przyciśnij środkowy przycisk ustawień, aby przejść do ustawień roku.

5 Ustawianie daty - rok

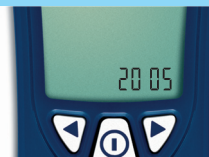

- Ustaw właściwy rok używając przycisku „wstecz” lub „do przodu”.
- Krótco przyciśnij środkowy przycisk ustawień, aby przejść do ustawień miesiąca.


6 Ustawianie daty - miesiąc



- Ustaw miesiąc używając przycisków „wstecz” lub „do przodu”.
- Krótco przyciśnij środkowy przycisk ustawień, aby przejść do ustawień dnia.

Przejdź na następną stronę

7 Ustawianie daty - dzień

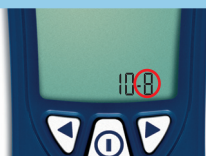

- Ustaw dzień miesiąca używając przycisków „wstecz” lub „do przodu”.
- Krótko przyciśnij środkowy przycisk ustawień, aby przejść do ustawień formatu godziny.

8 Ustawianie formatu godziny



- Ustaw format godziny (12 godzinny z oznaczeniami AM dla godzin przedpołudniowych i PM dla godzin popołudniowych lub 24 godzinny) używając przycisków „wstecz” lub „do przodu”.
- Krótko przyciśnij środkowy przycisk ustawień, aby przejść do ustawień formatu daty.

9 Ustawianie formatu daty



- Ustaw format daty (dzień/miesiąc lub miesiąc/dzień) używając przycisków „wstecz” lub „do przodu”.
- Krótko przyciśnij środkowy przycisk ustawień, aby przejść dalej.

10 Wyjście z opcji ustawień



- Przyciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk ustawień do momentu wyłączenia się glukometru.
- Twoje ustawienia zostały zapamiętane.

www.abbott-diabetes-care.pl

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
Abbott Diabetes Care, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa

Infolinia: 0 801 379 799

(od 9.00 do 17.00 w dni powszednie, opłata wg taryfy lokalnej)

Abbott
A Promise for Life